

## **Használati útmutató**

### Szabadon álló WC keret

A termék használata előtt kérem alaposan olvassa át a használati útmutatót! A terméket csak a leírásnak megfelelően és a megadott használati célokra használja! A nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a terméket átadja másnak az útmutatót mindenképp mellékelje.

#### **Rendeltetés szerű használata:**

A terméket a wc-ről való felállás, vagy leülés megkönnyítése érdekében fejlesztették ki. Különösen ajánlott idősek, vagy mozgásban korlátozott személyek részére. A terméket nem szükséges rögzíteni. Szabadon állítva biztonságos támasztékot ad használójának. Praktikus oldal tárolója alkalmas wc papír, újság, vagy egyéb kisebb tárgyak tárolására. Személyes használatra készült! Ipari felhasználásra nem alkalmas.

#### **Kicsomagolás:**

A termék kicsomagolásánál ellenőrizze az alkatrészek állapotát. Távolítson el minden csomagoló anyagot és védőfóliát. A csomagoló anyagokat gyermekektől tartsa távol, a fulladás elkerülése érdekében. Ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül a termék kicsomagolása közben! Ellenőrizze a termék alkatrészeit. Vegye szemügyre a termék állapotát! Használat előtt ismerkedjen meg a termék tartozékaival, működési elvével! Legyen körültekintő az éles vágó részek kicsomagolásánál!

A termék összeszereléséhez kövesse a következő ábrán látható utasításokat:

